

5 masques lavable & réutilisable 30 fois

2,5 mois de protection pour 1 personne*

1 utilisation = 4h de port du masque
* dans le cadre d'une utilisation de 2 masques/ jour (8h)



Certifié **GOTS**
et **OEKO TEX**



Partenariat avec
des **entreprises**
adaptées




Zéro déchet
En fin de vie,
recyclez-moi




100% fait en
France

Inclus dans ce pack

Barrettes nasales
pour faciliter le port

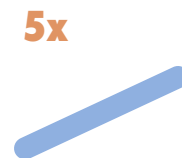

Deux manières de porter
le masque pour un port agréable

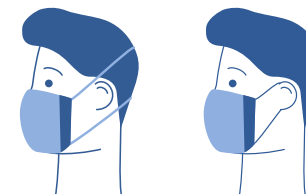

Très bonne **respirabilité**
par le masque




Lavage

À laver avant le premier usage puis après chaque utilisation




Utiliser un filet
à linge (afin
notamment
de limiter
l'effilochage)

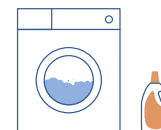

Laver en machine
avec un produit
lessiviel classique, un
cycle au minimum de
30min à 60°C avec
un essorage
à 1200 tours/min.



Étirer le masque
encore humide dans
les deux sens pour
lui redonner ses
dimensions initiales
avant son séchage.

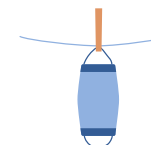

Laisser sécher
à l'air libre. Le
séchage doit
durer moins de
2 heures.



Repasser
délicatement sans
écraser le tissu, sur
les 2 faces entre
120/130°C (c'est-
à-dire entre les
points 1 et 2 du fer
à repasser).



Entreprise
du Patrimoine
Vivant

FACE AU COVID-19 L'histoire d'Indispenmasque

L'Indispenmasque a été développé Les Tissages de Charlieu dans la Loire (42). Toutes les équipes se sont mobilisées pour apporter leur soutien face à la crise du Covid-19.



Pour en savoir plus
sur l'histoire de
l'Indispenmasque

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Un premier cycle d'entretien est requis avant 1er usage (cf. Utilisation ci-dessous).
- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche, votre nez et votre menton.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.

DOMAINE D'UTILISATION :

Ce masque est destiné au grand public et aux professionnels dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement et au déconfinement, et des gestes barrières.

Dans le cadre d'un usage professionnel, ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre...). Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.

Avertissement :

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur et en aucun cas au fabricant de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites dans cette notice. Toute utilisation en dehors des critères et consignes précisés dans ce document est en dehors de la responsabilité du fabricant.

UTILISATION :

Le temps de port du masque est limité à 4 heures consécutives maximum. Le masque ne doit pas être porté en position d'attente sur le front ou sur le menton pendant son port.

Avant la première utilisation, passer à la vapeur (fer à repasser sans appuyer sur le masque afin de gonfler la couche interne et de rétracter les fils élasthanne), laver et sécher le masque selon le cycle d'entretien présenté ci-après. La barrette métallique fournie est réutilisable (à retirer du masque lors des cycles d'entretien).

Entretien du masque avec un traitement à domicile : (sur la base de l'avis révisé de l'ANSM en date du 21 avril 2020)

- Lavage en machine dans un filet à linge avec un produit lessiviel classique dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C. Essorage à 1200 tours/min maximum. Après lavage, étirer le masque pour qu'il retrouve son aspect d'origine.
- Séchage conventionnel (à l'air libre en moins de 2 heures), suivi d'un repassage à la vapeur sans écraser le tissu sur les 2 faces à une température comprise entre 120° et 130° (entre les points 1 et 2 du fer à repasser).
- Ce masque a été conçu pour être lavé et réutilisé 30 fois.

Avertissement :

Ne pas utiliser de sèche-linge.

Notre masque n'est pas adapté à un entretien en blanchisserie industrielle (entretien décrit dans l'avis révisé de l'ANSM en date du 21 avril 2020).


Cette pandémie exceptionnelle et l'acquisition quotidienne de nouvelles données pour y faire face exigent des efforts permanents d'adaptation ; nous restons constamment vigilants et travaillons quotidiennement pour assurer de notre mieux la sécurité de tous. Cette notice peut ainsi évoluer selon les nouvelles informations réglementaires ; nous vous prions de nous excuser de l'éventuelle gêne occasionnée.

RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION DES MASQUES :

1. Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon et exercer une friction des mains avec une solution hydroalcoolique ;
2. Vérifier le bon état du masque (le masque étant confectionné en tissu, il se peut que quelques fils apparaissent sur les côtés du masque : il suffit de les Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon, et exercer une friction des mains avec une solution hydroalcoolique ;
7. Si besoin de boire ou de manger, retirer le masque en place en attrapant les élastiques par derrière sans toucher le devant du masque, en disposant selon les modalités ci-après, et utiliser un autre masque ; tirer délicatement ou de les couper avec une paire de ciseaux)
3. Repérer sur le côté en haut à droite sous l'élastique un angle au motif différent des autres ; il comporte sur le côté une ouverture dans laquelle il convient d'insérer et centrer la barrette.

4. Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton, placer les élastiques latéraux derrière les oreilles et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage grâce à la barrette métallique par appuis consécutifs du centre vers l'extérieur, en évitant les pincements ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;
5. Une fois en place, éviter de le toucher et/ou de le déplacer ;
8. Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque ;
9. Pour retirer le masque : l'enlever en attrapant les élastiques par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac fermé prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l'eau et au savon et exercer une friction des mains avec une solution hydroalcoolique


Stockage : En dehors des périodes d'utilisation, les masques sont à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière

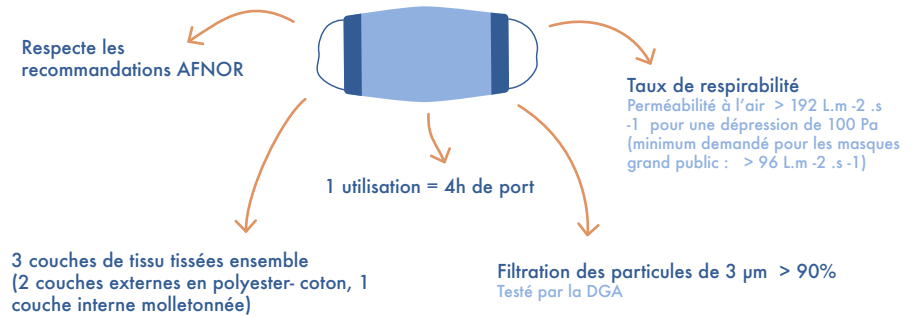

Utilisation des élastiques amovibles




Accrochez à votre convenance 1 ou 2 élastiques pour un maintien optimal

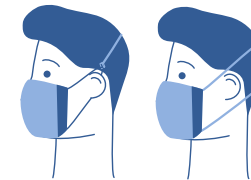

Insertion de la barrette métallique



Au niveau de l'angle, «frotter» entre vos doigts le masque pour repérer l'ouverture.

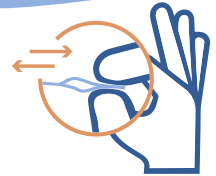

Cette barrette est à enlever avant le passage en machine de votre masque

Port du masque

